




Toma de muestra ADN Felinos

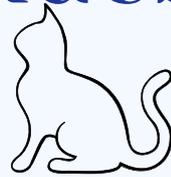

Para extraer una muestra, no se requiere la presencia de un veterinario. El dueño puede realizar esta tarea siguiendo las siguientes pautas y precauciones:

- ¡Atención! Para realizar el test, esperemos a que el animal tenga al menos 4 semanas de edad. Es importante que evitemos el periodo de lactancia para no arrastrar células de la madre. En caso de que se tome muestra en este lapso, esperar al menos 1 hora antes de hacerlo.
- Si el animal ha comido, esperar 30 minutos antes de tomar la muestra. Para hacerlo necesitaremos hisopos de madera o plástico (tipo cotonete), no hace falta que estén estériles. Si los hisopos son de doble extremo, ¡utiliza ambos!
- Por último, remite 2 hisopos si se han usado ambos extremos o 4 hisopos de punta simple, dentro de un sobre con los datos del animal y el solicitante. Una vez extraída la muestra, ¡conservar los hisopos a temperatura ambiente, y pueden durar así varias semanas!



Paso a Paso

1. Introduzca el hisopo entre la encía y la cara interna de la mejilla, frotando el hisopo contra la cara interna de la mejilla repetidas veces. Dejar secar.


IMPORTANTE: No recoger saliva. El diagnóstico se realiza sobre el ADN presente en las células extraídas de la cara interna de las mejillas, por lo cual la saliva no es un material válido. Por favor, envíe las muestras secas.

2. Repetir esta operación 4 veces.

3. Lavarse las manos o cambiar los guantes antes de tomar una nueva muestra a otro animal. Esto previene la contaminación de las muestras entre sí.

4. Los cepillos pueden conservarse durante semanas a temperatura ambiente.

1

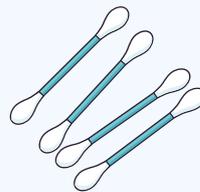

4





¡Atención!

Te contamos cómo remitir tus muestras al laboratorio:

- Las muestras y la solicitud de análisis pueden entregarse en el Laboratorio de Genética Aplicada (Juncal 4431, 2º piso), de Lu-Vi de 9-00 a 15:00 hs o a través de un servicio de mensajería/correo, en la guardia del predio (Juncal 4431), de Lu-Vi, de 8-21 hs. En ese caso, deberá remitirse además el comprobante de pago, si el mismo se efectuó por transferencia bancaria.
- Para descargar el sobre y la solicitud de análisis, entrá a <http://www.sra.org.ar/laboratorio-instructivos-filtros/#> y seleccioná Felinos.
- Formas de pago: <http://www.sra.org.ar/laboratorio-instructivos-filtros/#>. Seleccionar Felinos. (Datos de Cuentas Bancarias)

¡Falta lo más importante!

Los **resultados** los recibirás dentro de los próximos 10 a 15 días por e-mail.



Una guía audiovisual instructiva:

https://www.youtube.com/watch?v=WWFpK_MA-9I



Llamanos cuando lo necesites.

 (011) 58611211/12

 **11-5039 4566**

www.sra.org.ar