



Toma de muestra ADN caninos



Recomendamos esperar hasta que los cachorros tengan mínimo cuatro semanas antes de hacer la prueba.

Para extraer una muestra, no se requiere la presencia de un veterinario. El dueño puede realizar esta tarea siguiendo las siguientes pautas y precauciones:

- ¡Atención! Si quieres hacer el test, espera hasta que tu cachorro tenga 4 semanas de edad, aísla a cada cachorro de la madre y compañeros de camada para no mezclar sus células. También es importante que no haya lactado o comido nada en los últimos 30 minutos antes de tomar la muestra. ¡Asegura el éxito de la prueba!
- ¡Prepárate con 4 cepillos por animal! Puedes utilizar un cepillo citológico o uno interdental grande tipo **GUM**. Estamos listos para hacer la prueba.



Paso a Paso

1. Introduzca el cepillo entre la encía y la cara interna de la mejilla, gire el mismo 8-10 veces sobre la mejilla. Retirar y dejar secar.

¡IMPORTANTE: No recoger saliva. El diagnóstico se realiza sobre el ADN presente en las células extraídas de la cara interna de las mejillas, por lo cual la saliva no es un material válido. Remitir las muestras secas.


2. Repetir esta operación 4 veces utilizando distintos cepillos.

3. Lavarse las manos o cambiar los guantes antes de tomar muestra a otro animal para prevenir la contaminación de las muestras entre sí.

4. Remitir 4 cepillos por ejemplar en el sobre provisto por la SRA. Junto con las muestras deberá enviar la Solicitud de análisis.

- Los cepillos pueden conservarse durante semanas a temperatura ambiente.

1

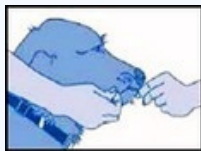

4





¡Atención!

Te contamos cómo remitir tus muestras al laboratorio:

- Las muestras y la solicitud de análisis pueden entregarse en el Laboratorio de Genética Aplicada (Juncal 4431, 2º piso), de Lu-Vi de 9-00 a 15:00 hs o a través de un servicio de mensajería/correo, en la guardia del predio (Juncal 4431), de Lu-Vi, de 8-21 hs. En ese caso, deberá remitirse además el comprobante de pago, si el mismo se efectuó por transferencia bancaria.
- Para descargar el sobre y la solicitud de análisis, entrá a <http://www.sra.org.ar/laboratorio-instructivos-filtros/#> y seleccioná Caninos.
- Formas de pago: <http://www.sra.org.ar/laboratorio-instructivos-filtros/#> Seleccioná Caninos. (Datos de Cuentas Bancarias)

¡Falta lo más importante!

Los **resultados** los recibirás dentro de los próximos 10 a 15 días por e-mail.





Una guía audiovisual instructiva:

<https://www.youtube.com/watch?v=n-zicSAEIDg>



Llamanos cuando lo necesites.

 (011) 58611211/12

 **11-5039 4566**

www.sra.org.ar